



# Bruksanvisning för Stirex saxar

**Artikelnr:** S-300, S-300BM, S-310, S-310BM, S-32, S-32X, S-35, S-35BM, S-35BX, S-36, S-95BX

## Säkerhet:

- Använd inte produkten på annat sätt än vad som är avsett.
- Var försiktig då saxbladen är vassa.
- Klipp endast i mjuka eller halvhårda material med saxen.
- Förvara saxen på ett säkert sätt och utom räckhåll för barn då den inte är avsedd att användas av eller i närheten av barn. Barn bör inte använda barnsaxen utan vuxens översyn.
- Undvik att klippa i saker som saxen inte är avsedd för, exempelvis hårda föremål.
- Undvik att använda saxen om ni känner smärta eller obehag i samband med användandet av den.

## Användning:

Stirex barnsax, ficksax, kökssax, nagelsax, sax och tygsax har samma användningsområden som vanliga saxar. Stirex saxar är utrustade med ett fjäderband vilket ger en mjuk återfjädring som underlättar både i ett förebyggande syfte och om man är lite svag i handen eller tumbasen. Fronten av rostfritt stål är ingjuten i handtag av miljövänlig plast. Alla Stirex saxar är avsedda att användas till att klippa med i mjuka till halvhårda material.

**Skötsel:** Saxen kan maskindiskas och kokas.

Handdisk är skonsammast. Saxen kan med fördel slipas efter behov.

## Teknisk specifikation:

Art nr:	Benämning:	Frontlängd:	Vikt:
S-300	Stirex Sax	6 cm	26 g
S-300BM	Stirex Sax	6 cm	35 g
S-310	Stirex Sax	6 cm	26 g
S-310BM	Stirex Sax	6 cm	36 g
S-32	Stirex Barnsax	6 cm	26 g
S-32X	Stirex Ficksax	6 cm	30 g
S-35	Stirex Kökssax	10,5 cm	57 g
S-35BM	Stirex Kökssax	10,5 cm	66 g
S-35BX	Stirex Kökssax	10,5 cm	76 g
S-36	Stirex Sax	10,5 cm	59 g
S-95BX	Stirex Tygsax	15 cm	138 g

## Material:

**Handtag:** PP, **Saxfront:** Rostfritt stål

## Symboler:



Våra produkter uppfyller kraven för CE-märkning och följer EU-direktiven 93/42/EEG samt 2007/47/EG för medicintekniska produkter.

## Tillverkare:

Stirex Innovation AB  
Box 109  
191 22 Sollentuna  
Tel: 08-760 02 55  
[www.stirex.se](http://www.stirex.se)  
[info@stirex.se](mailto:info@stirex.se)